

Core & Post Systém

Ilustrovaný návod na použití

Systém obsahuje

X•Post™

č.1/žlutý


č.2/červený

č.3/modrý


č.4/zelený

Largo® Peeso pronikač č.1, č.2, č.3, č.4


Easy Post vrtáček č.1, č.2, č.3, č.4

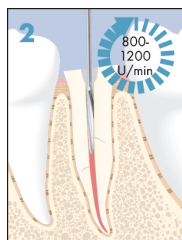


Odstraňte kořenovou výplň odpovídajícím (viz Tabulka 1) Largo® Peeso pronikačem (rychlost otáček 800-1200 ot/min).

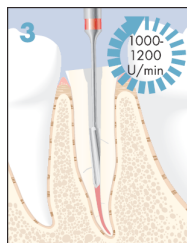

Preparujte kanálek zvoleným Easy Post vrtáčkem (1000-1200 ot/min).

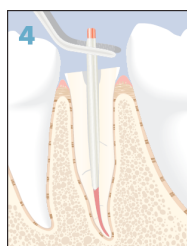


Zkontrolujte umístění X•Post™ čepu ve vypreparovaném kanálku. Označte vhodnou délku čepu.

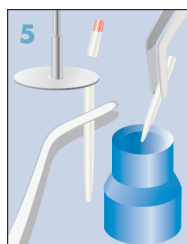


Upravte délku X•Post™ čepu seříznutím diamantovým diskem mimo ústní dutinu. Potom očistěte alkoholem.


Ilustrovaný návod na použití - Core&Post Systém

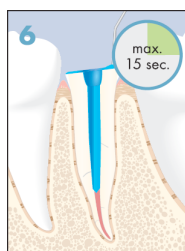


Naleptejte dentin použitím DeTrey® Conditioner 36 po dobu 15 sekund.

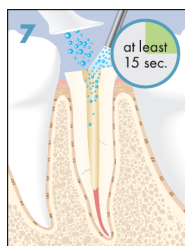

Odstraňte gel a oplachujte vodním sprejem 15 sekund.

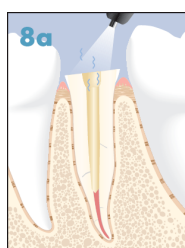


Jemně odstraňte zbytek vody proudem vzduchu...

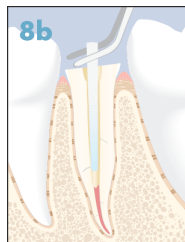

... nebo papírovým čepem.
Nepřesušte!




Na míchací mističku CliXdish™ aplikujte nejprve XP BOND™ a následně Self Cure Activator (SCA) v poměru 1:1. Míchejte minimálně 2 sekundy.

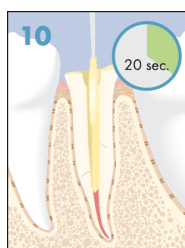


Naneste XP BOND™/SCA do kanálku i na ostatní plochy. Nechte působit 20 sekund.


Ilustrovaný návod na použití - Core&Post Systém

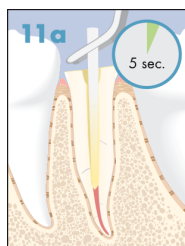


Papírovým čepem odstraňte přebytek směsi XP BOND™/SCA.

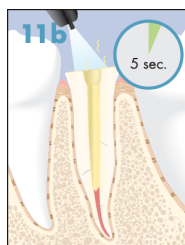


Jemným proudem vzduchu odstraňte přebytek rozpouštědla.

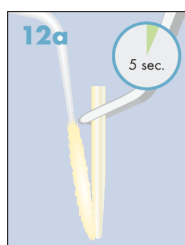


Na celý povrch X•Post™ čepu aplikujte směs XP BOND™/SCA.

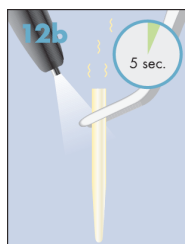

Přebytek směsi XP BOND™/SCA odstraňte jemným proudem vzduchu. Zabraňte přístupu přímého světla.

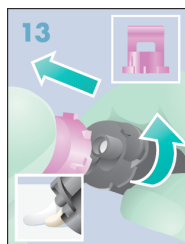

Odstraňte čepičku Core•x™ flow stříkačky a vytlačte malé množství materiálu.

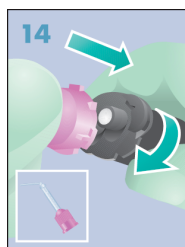


Nasadte míchací násadec na zásobník (sledujte zářez tvaru V). Otočte hlavičku násadce o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zamkněte.


Ilustrovaný návod na použití - Core&Post Systém




Jemně vytlačte malé množství na míchací podložku.
NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNOU SÍLU!

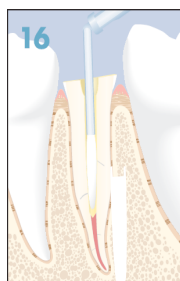

Aplikujte Core•x™ flow přímo do kanálku. Okamžitě umístěte čep do definitivní polohy a stabilizujte. **Čep musí být definitivně umístěný do 40 sekund.**

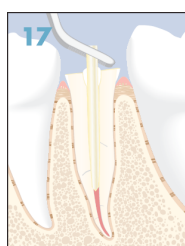


Okamžitě umístěte čep do definitivní polohy a stabilizujte. **Čep musí být definitivně umístěný do 40 sekund.**

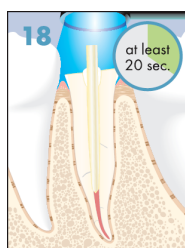


Stabilizovaný čep polymerizujte minimálně 20 sekund.

Výkon polymerizační lampy $\geq 550 \text{ mW/cm}^2$

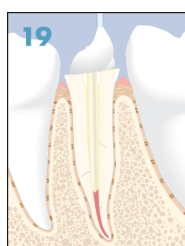


Domodelujte vlastní čepovou nadstavbu aplikací materiálu z Core•x™ flow stříkačky.

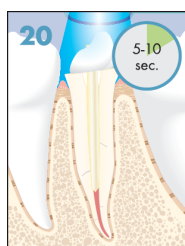


Materiál je možné krátce polymerizovat za účelem fixování tvaru.

Ilustrovaný návod na použití - Core&Post Systém

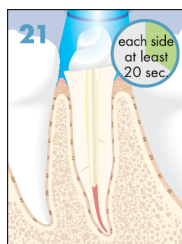

Na závěr polymerizujte nejméně 20 sekund z každé strany nebo počkejte 3,5 minuty.

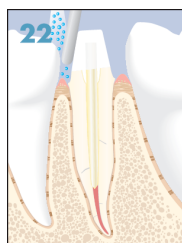

Definitivní tvar čepové nadstavby vypreparujte rotačními instrumenty s chlazením.



Pokračujte zhotovením otisku nebo provizorní korunky.

www.dentsply.sk