

# NUPRO PROFYLAKTICKÁ PASTA

Leštící pasta

## UPOZORNĚNÍ

Pouze pro použití ve stomatologii.

**Tato informace se týká následujících balení produktu:**

200 individuálních 2g kalíšků \*

nebo

340g kelímek

\*(kalíšky s jemnou pastou váží 1,9g)

### **Bez obsahu fluoridu**

- **Jemná pasta – kalíšky**
- **Střední – kalíšky**
- **Hrubá – kalíšky**

Orange (pomerančová)

### **S obsahem fluoridu**

- **Jemná pasta – kalíšky**

Orange (pomerančová)

Mint (mátová)

- **Střední – kalíšky**

Mint (mátová)

Orange (pomerančová)

Cherry (třešňová)

- **Hrubá – kalíšky**

Mint (mátová)

Orange (pomerančová)

Cherry (třešňová)

### **Bez obsahu fluoridu**

- **Jemná pasta – kelímek**
- **Střední – kelímek**
- **Hrubá – kelímek**

Orange (pomerančová)

### **S obsahem fluoridu**

- **Střední – kelímek**

- **Hrubá – kelímek**

Mint (mátová)

**Profylaktická pasta NUPRO je k dostání v následujících hrubostech:**

F – fine = jemná

Ideální pro mladší pacienty

M – medium = střední

Pro vysoký lesk

C – coarse = hrubá

Pro kuřáky

## INDIKACE

Leštění povrchu zubu.

## **SLOŽENÍ**

Profylaktická pasta NUPRO obsahuje pemzu, glycerin, sodnou sůl sacharinu, vodu, křemičitan sodný, aroma, barvivo, pojivo a konzervační látky. Toto složení určuje pastu k použití na leštění zubů během ošetření ve stomatologické praxi.

## **KONTRAINDIKACE**

Pasta NUPRO se nesmí používat u pacientů se známou alergií na jakoukoli její složku.

## **VAROVÁNÍ**

- Pasta NUPRO může dráždit oči. Dojde-li ke kontaminaci očí pastou, vyplachujte je okamžitě dostatečným množstvím vody po dobu 15min. Pokud dráždění přetrvává, zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Pasty NUPRO smí používat pouze lékař nebo proškolený zdravotnický personál
- Během používání pasty noste ochranné brýle a rukavice

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

Při používání kelímků si potřebné množství pasty oddělte do vhodné nádoby.  
V individuálních kalíšcích je dostatečné množství pasty k ošetření jednoho pacienta.

Profylaktický kartáček nebo kalíšek naplňte pastou tak, že jej za nízkých otáček vtlačíte do kalíšku s pastou.

Používejte vždy dostatečné množství pasty, aby nedocházelo k přehřívání zubu. Polykání pasty a jejímu přílišnému rozpouštění v ústech zabráníte použitím savky.

## **SKLADOVÁNÍ**

Kelímky po použití ihned uzavřete, aby nedocházelo k vysychání pasty.  
Neskladujte při teplotách vyšších než 25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

## **VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE**

Nepoužívejte po datu expirace.

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu.