

---

Návod k použití Česky

## **DeTrey® Conditioner 36**

### **Gel kyseliny fosforečné určený k leptání zubní skloviny a k úpravě dentinu**

DeTrey Conditioner 36 je modře zbarvený gel obsahující 36% kyselinu fosforečnou pro leptání zubní skloviny a úpravu dentinu před aplikací adhezivního prostředku.

#### **SLOŽENÍ**

Kyselina fosforečná

Vysoce dispergovaný oxid křemičitý

Detergent

Pigment

Voda

#### **INDIKACE**

0. Při technice leptání skloviny pokud to klinická situace vyžaduje
1. Technika celkového leptání (Total Etch Technique) pokud to klinická situace vyžaduje

#### **KONTRAINDIKACE**

2. Aplikace na dentin v blízkosti pulpy (méně než 1mm).

#### **VAROVÁNÍ**

1. DeTrey Conditioner 36 obsahuje 36% kyselinu fosforečnou, která může způsobit poleptání. Zabraňte kontaktu s tkáněmi dutiny ústní, očima a pokožkou. V případě náhodné kontaminace oplachujte postiženou oblast dostatečným množstvím vody. V případě kontaminace očí okamžitě začněte oko vyplachovat dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

2. DeTrey Conditioner 36 gel jde lehce vytlačit. **NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNOU SÍLU.** Po použití stříkačku s gelem pečlivě uzavřete, aby nedošlo k vysychání.

# INTERAKCE S JINÝMI STOMATOLOGICKÝMI MATERIÁLY

Kyselina fosforečná může naleptat podložkový materiál. Za normálních okolností to ale nenarušuje jejich funkci.

## APLIKACE

### 1. ČIŠTĚNÍ

Odstraňte z povrchu zubu plak a nečistoty gumovým kalíškem a pemzou nebo profylaktickou pastou Nupro. Důkladně opláchněte a vzduchovou pistolí osušte.

### 2 Leptání skloviny a dentinu (Total Etch Technique)<sup>2</sup>

Doporučuje se použít dále popsanou techniku celkového leptání:

#### 2.1 Aplikace DeTrey Conditioner 36 ve stříkačkách

Odstraňte uzávěr stříkačky s gelem. Na stříkačku upevněte kanylu na jedno použití. Otočte kanylou ve směru hodinových ručiček, aby jste se ujistili, že je správně nasazena. Pro usnadnění přístupu je možné kanylu ohnout.

Jemně vytlačte DeTrey Conditioner 36 gel (36% kyselina fosforečná) na stěny kavity, začněte sklovinou. Pro dosažení optimálních výsledků leptejte sklovinu minimálně 15s a dentin 15s nebo méně. **Po použití stříkačku s gelem pečlivě uzavřete, aby nedošlo k vysychání.**

**UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNOU SÍLU.**

#### 2.2 Aplikace DeTrey Conditioner 36 dodávaného v lahvičkách

Oddělte malé množství kyseliny fosforečné na podložku nebo do mističky (Míchání snižuje viskozitu).

Jemným aplikačním štětečkem aplikujte na povrchy, které chcete naleptat. Pro dosažení optimálních výsledků leptejte sklovinu minimálně 15s a dentin 15s nebo méně.

### 3. Opláchnutí a sušení

Gel odstraňte pomocí savky a vodní spreje. Naleptané oblasti pečlivě oplachujte minimálně 15s.

Přebytky vody z kavity lehce vyfoukněte vzduchovou pistolí. Dentin nepřesušujte, povrch musí zůstat vlhký.

Naleptaná sklovina má mít matný, křídový vzhled. Pokud tomu tak není, opakujte pracovní postup, jak je popsán výše.

Po naleptání povrchu je nutné udržet jej čistý, bez kontaminace slinou. Pokud k tomu přece jen dojde, znečištěný povrch důkladně opláchněte sprejem vody, osušte, znovu leptejte sklovinu po dobu 5s, opláchněte a osušte podle výše uvedených pokynů.

Pokračujte s dostavbovým materiálem.

## SKLADOVÁNÍ

Po použití stříkačku s gelem pečlivě uzavřete.

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách vyšších než 24stC.

### VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXSPIRACE

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu.

Nepoužívejte po expiračním datu.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte, prosíme:

**DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz**

**tel. (0 75 31) /583-0**

**DENTSPLY DeTrey, kancelář zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku,**

**Pod křížkem 2, 147 00 Praha 4, tel. 02/44462133**

© **DENTSPLY DeTrey 19-11-1999**

[2](#) Nechcete-li používat techniku celkového leptání, leptejte pouze sklovinu. V tomto případě naneste gel pouze na sklovinné okraje kavity na 15s. Potom oplachujte a sušte tak, jak je popsáno dále.