

# **Illuminé™ Gel pro domácí bělení (Illuminé home)**

## **Bělící gel**

Illuminé gel pro domácí bělení může být používán samostatně nebo jako pokračování po ordinačním bělení.

Illuminé gel pro domácí bělení obsahuje jako aktivní složku karbamid peroxid, který je prokazatelně nejúčinnější při domácí léčbě nežádoucího zbarvení zubů.

Illuminé 10% gel pro domácí bělení obsahuje 10% karbamid peroxid, uvolňující H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> v koncentraci 3,6%.

Illuminé 15% gel pro domácí bělení obsahuje 15% karbamid peroxid, uvolňující H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> v koncentraci 5,4%.

## **SLOŽENÍ**

### **Illuminé 10% gel pro domácí bělení:**

10% karbamid peroxid  
Glycerin  
Karboxypolymethylen  
hydroxid sodný  
voda  
mentolovou příchuť

### **Illuminé 15% gel pro domácí bělení:**

15% karbamid peroxid  
Glycerin  
karboxypolymethylen  
hydroxid sodný  
voda  
mentolovou příchuť  
fluorid sodný

Hodnota pH Illuminé 10% a 15% gelu pro domácí bělení je přibližně 6.0.

## **INDIKACE**

### **1. Zbarvení zubu způsobené:**

- Zbarvení od potravin, nápojů a tabákových výrobků, s pigmenty v zubní tkáni
- Zbarvení způsobená věkem
- Tetracyklinová zbarvení (prvého a druhého stupně) nebo minocyklinová zbarvení
- Fluoróza, obzvláště hnědá zbarvení.
- Nekróza zubní dřevě a/nebo endodontické ošetření

### **2. Nežádoucí zbarvení způsobená věkem**

### **3. Geneticky zbarvené zuby**

### **4. Bělení zbarvených zubů před konzervativními a protetickými ošetřeními, např. fazetování.**

Nejllepších výsledků je dosaženo u pacientů, jejichž zbarvení je do žluta, oranžova, nebo světle hněda.

### **Aplikace bělicího gelu**

1. Vyčistěte si zuby zubním kartáčkem, zubní pastou a zubní nití.
2. Před prvním použitím stříkaček Illuminé pro domácí bělení odstraňte uzávěr stříkačky s gelem.
3. Nasadte aplikační koncovku a odlomte její špičku. Špičku na koncovku opět nasadte po použití.
4. Dle doporučení svého zubního lékaře naneste malé množství gelu na přední stěny zubů v nosiči. Nosič **NEPŘEPLŇUJTE**.
5. Umístěte nosič do úst přes zuby. Odstraňte přebytky materiálu z dásně prstem nebo zubním kartáčkem.
6. Ponechte nasazený nosič na zubech přes noc nebo dle doporučení Vašeho zubního lékaře (minimálně doporučená doba jsou 2 hodiny).
7. V průběhu nasazeného nosiče nejezte, nepijte a nekuřte.
8. Vypláchněte ústa a odstraňte zbylý gel ulpívající na zubech.
9. Opláchněte nosič pod vodou a vyčistěte ho zubním kartáčkem. Dokonale vysušte a uložte do krabičky, k tomu určené.

### **DĚLKA BĚLENÍ**

Běžná délka bělení se pohybuje od jednoho do dvou týdnů a končí, když je požadovaná barva zubů docílena.

Při návštěvě u Vašeho zubního lékaře, bude stanoven konečný výsledek.

V některých případech, doba léčby může být prodloužena o 6 týdnů až 8 měsíců, tak aby bylo docíleno požadovaného výsledku.

Obvykle, dosažený výsledek vydrží až 2 roky.

**Výrobce:**

**DENTSPLY DeTrey GmbH  
De-Trey Strasse 1  
D – 78467 Konstanz**