

Návod k použití

Peripac

Parodontologický obvaz

SLOŽENÍ

Síran vápenatý
Síran zinečnatý
Oxid zinečnatý
Polymetyl metakrylát
Dimetoxi tetraethylenglykol
Kyselina askorbová
Aroma
Pigmenty oxidu železa

INDIKACE

Parodontologický obvaz po:

1. gingivektomiích a papilektomiích;
2. hlubokých kyretážích
3. operacích na parodontu;
4. repozicích gingivy;

Peripac se též hodí k:

5. ošetření nekrotické gingivitidy. V těchto případech by měl být prášek s antibiotiky vmíšen do materiálu stočením na papírovém ubrousku. Obvaz zajistí kontakt léčiva s ulcerózní tkání. Obvaz by měl být vyměňován každý den;
6. ochraně necharakteristických poškození nebo sešitých okrajů;
7. upevnění desenzibilizačních přípravků v krčkové oblasti;
8. dočasné rebazi imediátních protéz v parodontální chirurgii.

KONTRAIDIKACE

Pacienti s prokázanou alergií na složky materiálu.

VAROVÁNÍ

1. Peripac obsahuje polymetyl metakrylát a dimetoxi tetraethylenglykol, které mohou dráždit kůži a oči. Při náhodné kontaminaci očí je vyplachujte dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc. Při náhodné kontaminaci pokožky ji oplachujte dostatečným množstvím vody a mýdla.
2. Produkt může u náchylných lidí sensibilizovat pokožku. Při eventuálních známkách dráždění přerušete používání.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

Kontaktní dermatitida nebo jiné alergické reakce se mohou objevit u náchylných lidí.

Jestliže je obvaz v kontaktu s pohyblivou sliznicí, může se vytvořit tlakový vřed.

APLIKACE

Peripac vyžaduje způsob aplikace odlišný od běžných obvazů obsahujících eugenol. Specifické vlastnosti Peripacu vedou k menší spotřebě materiálu. Pomocí suché a sterilní lopatičky oddělte z kelímku malé množství materiálu a položte na papírový ubrousek. Kelímek ihned uzavřete.

Suchými prsty zformujte materiál do patřičné délky a tloušťky části dásně, kterou hodláte překrýt. V případě potřeby je možné přidat léčivo v prášku.

Při překrytí **rozsáhlé rány po gingivectomii**, je vhodné nanést materiál prsty. Obvaz by měl být zatlačením adaptován do mezizubních prostorů od apexu směrem okluzálním, respektive incizálním, a odstraněny přebytky z okluzních ploch. **V průběhu aplikace mohou vlhké prsty s vodou nebo slinou chránit materiál před lepením k nim.** Malá, lehce zvlhčená vatová peleta uchycená v pinzetě je vhodná pro konečnou adaptaci Peripacu do mezizubních prostor. Před konečným ztuhnutím materiálu zkontrolujte okluzní plochy. Pryskeřičné korunky by měly být chráněny tenkou vrstvou vazelíny, aby se předešlo přilepení materiálu.

K ochraně mechanického dráždění, obvaz by měl krýt pouze ránu a/nebo okraje periodontia. Neměla by být překryta pohyblivá sliznice. V oblastech vystavených zvýšenému žvýkáckému tlaku, by měl být okraj obvazu ležící na korunce zubu chráněn místní aplikací tkáňového adheziva. Peripac is applied with a moistened finger from the occlusal aspect on the wound, on the exposed cavity margins and into the prepared and calciumhydroxide lined cavity. Zkontrolujte okluzi dokud je Peripac ještě plastický. Tuhnutí materiálu začíná jakmile dojde ke kontaktu s vodou a je dokončeno asi za 20 minut. Aplikace obvazu by neměla přesáhnout 2-3 minuty a další formování nebo přidávání materiálu je nemožné, jakmile je tuhnutí započato. Správně nanesený obvaz může být ponechán beze změny po dobu 8-10 dnů, pokud jsou ústa denně vyplachována roztokem chlorhexidinu. Pacient však ocení, pokud je rozsáhlý obvaz vyměňován po 3-5 dnech při kontrole rány. S Peripacem toho můžete docílit bez větší námahy.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v pokojové teplotě (15-25°C) a chraňte před vlhkostí uzavřením kelímku.

Skladování při vyšší teplotě zvýší viskozitu a tak tloušťku materiálu.

Skladování materiálu v chladničce může vést k absorpci vody a zapříčinit předčasné ztuhnutí pasty.

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci výrobků.

Nepoužívejte po expiračním datu.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte, prosíme:

DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz

tel. 0 75 31/5 83-0

DENTSPLY DeTrey kancelář pro Českou a Slovenskou republiku, Pod křížkem 2, 147
00 Praha 4, tel. 02-444 68 133