

Návod na použitie Slovensky

AH Plus® Cleaner

Tekutina k odstraňovaniu nevytvrdeného pečatidla koreňových kanálikov AH Plus®

1 Popis produktu

Tekutina **AH Plus® Cleaner** sa používa pri zhotovovaní výplne koreňového kanálika a adhezívnej výplne zubu počas jednej návštevy ordinácie.

Tekutina **AH Plus® Cleaner** je navrhnutá k odstraňovaniu zvyškov nevytvrdeného pečatidla koreňových kanálikov AH Plus® zo stien kavity.

Tekutina **AH Plus® Cleaner** poskytuje nasledujúce vlastnosti:

- Odstraňuje zvyšky nevytvrdeného pečatidla koreňových kanálikov AH Plus® zo skloviny a dentínu.
- Pripravuje sklovinu a dentín pre nanášanie univerzálneho adhezíva Total-Etch XP BOND®, adhezívum využívajúce nano-technológiu Prime&Bond® NT a jednozložkového samo-leptacieho adhezíva Xeno® V+.

1.1 Forma balenia

- Lahko stlačiteľná fľaštička

1.2 Zloženie

- Etanol
- Terciárny butanol
- Voda

1.3 Indikácie

- Odstraňovanie zvyškov nevytvrdeného pečatidla koreňových kanálikov AH Plus® zo stien kavity pred zhotovením adhezívnej výplne.

1.4 Kontraindikácie

- Niesú známe.

2 Bezpečnostné upozornenia

Dbajte na nasledujúce všeobecné bezpečnostné upozornenia a zvláštne bezpečnostné upozornenia v ďalších častiach tohto návodu na použitie.

2.1 Upozornenia

Tento materiál obsahuje terciárny butanol, ktorý môže dráždiť kožu a oči.

- **Vyhýbajte sa kontaktu s očami** ako prevenciu podráždenia a poškodenia rohovky. V prípade kontaktu s očami okamžite vypláchnite množstvom vody a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
- **Vyhýbajte sa kontaktu s kožou** ako prevenciu podráždenia. V prípade kontaktu s pokožkou, miesto okamžite umyte mydlom a vodou a dôkladne opláchnite.

2.2 Varovania

Tento produkt by sa mal používať tak ako je to uvedené v Návode na použitie.

Každé použitie v nesúlade s Návodom na použitie je na zväžení a plnej zodpovednosti zubného lekára.

- Používajte ochranné prostriedky určené pre pracovníkov zubnej ambulancie a pacientov ako sú okuliare, gumová blana a to podľa najlepších zaužívaných miestnych postupov.
- Kontakt so slinou, krvou a sulkulárnou tekutinou počas aplikácie môže viesť k zlyhaniu výplne. Použite vhodné prostriedky na izoláciu akými je napr.gumová blana.
- Po ukončení aplikácie tesne uzavrite fľaštičku.
- Použite v dobre vetraných priestoroch. Vyhnite sa inhalácii výparov.
- Horľavina: Izolujte od zdrojov ohňa. Zamedzte kontaktu so statickým výbojom.
- Penové peletky sú navrhnuté iba pre jednorázové použitie. Po použití zahodte. Nepoužívajte u iných pacientov, aby ste zabránili prenosu infekcie.

2.3 Nežiadúce reakcie

- Kontakt s očami: Podráždenie a možné poškodenie rohovky.
- Kontakt s pokožkou: Môže spôsobiť podráždenie pokožky.

2.4 Skladovacie podmienky

Nevhodné skladovacie podmienky môžu skrátiť expiračnú dobu a viesť k zlyhaniu produktu.

- Skladujte produkt pri teplote medzi 2 °C až 28 °C. Používajte produkt pri izbovej teplote.
- Nezmrazujte.

- Nepoužívajte po dátume expirácie.

3 Návod – krok za krokom

3.1 Preparácia

1. Zhotovte výplň kořenového kanálíka pomocou gutaperčových čapov a pečatidla koreňových kanálikov tak, aby bola koronálna časť koreňového kanálíka vyplnená hlavne gutaperčou (napr. použitím pomocných gutaperčových čapov).
2. Horúcim nástrojom (exkavátor) odstráňte prebytočnú dĺžku čapov.
3. Ručným nástrojom (guľaté utláčadlo) ihneď stlačte stále horúcu gutaperču apikálnym smerom. Z koreňového kanálíka sa vytlačí pečatidlo koreňových kanálikov AH Plus[®] a koronálny koniec kanálíka je v tejto chvíli úplne vyplnený gutaperčou.

3.2 Dávkovanie

Lahko stlačiteľná fľaštička

1. Do čistej miešacej misky Applicator Dish alebo štandardnej miešacej misky alebo miešacej podložky naneste hojné množstvo tekutiny AH Plus[®] Cleaner. Ak je to potrebné, je možné zabrániť odparovaniu priklopením miešacej misky inou miešacou miskou.
2. Okamžite uzatvorte viečkom.

3.3 Aplikácia

1. Penovými peletkami nasiaknutými tekutinou AH Plus[®] Cleaner odstráňte všetky zbytky nevytvrdeného pečatidla koreňových kanálikov AH Plus[®] zo dna a stien prístupovej kavity.
2. Postup najmenej dvakrát zopakujte s doposiaľ nepoužitými peletkami nasiaknutými tekutinou AH Plus[®] Cleaner, kým nebude vidieť žiadne zbytky pečatidla AH Plus[®].
3. Silným prúdom vody odstráňte zbytky tekutiny AH Plus[®] Cleaner a vyčistené oblasti dôkladne oplachujte po dobu najmenej 5 sekúnd.
4. Vodu z oplachovania celkom odstráňte jemným prúdom vzduchu z vzduchovej pištoli.

Neúplné odstránenie:

- 1. Nevytvrdeného pečatidla koreňových kanálikov AH Plus[®]**
- 2. Tekutiny AH Plus[®] Cleaner**

Znížená adhézia

- 1. Odstráňte nevytvrdené pečatidlo koreňových kanálikov AH Plus[®] zo skloviny a dentínu čo najdôkladnejšie.**
- 2. Odstráňte zbytky tekutiny AH Plus[®] Cleaner zo skloviny a dentínu čo najdôkladnejšie.**

3.3.1 Priama adhezívna výplň

1. Ihneď pokračujte so zhotovovaním výplne.
2. Naneste samo-leptacie adhezívum Xeno[®] V⁺ alebo leptací gél DETREY[®] Conditioner 36, potom Prime&Bond[®] NT alebo leptadlo XP BOND[®] a opláchnite adhezívum. Pri nanášaní adhezíva postupujte podľa návodu na použitie výrobcu adhezíva.
3. Ihneď pokračujte s nanášaním výplňového materiálu. Doporučujeme použiť výplňový materiál SDR[™] Smart Dentin Replacement. Je navrhnutý pre vytvorenie základu výplní kavít I. a II. triedy. Ihneď pokračujte v zhotovovaní výplne pomocou univerzálneho/laterálneho výplňového materiálu s metakrylátovým základom. Pri nanášaní postupujte podľa návodu na použitie výrobcu.

4 Hygiena

4.1 Applicator Dish zmiešavacia miska

4.1.1 Čistenie

1. Zbytky tekutiny AH Plus[®] Cleaner utrite papierovou utierkou.
2. Očistíte vodou a mydlom.

4.1.2 Dezinfekcia

1. Dezinfikujte vodným roztokom určeným pre zdravotnícke zariadenia podľa platných národných/miestnych predpisov.
2. Dbajte na Návod na použitie vydaný výrobcom dezinfekčného prípravku.
3. Opláchnite a osušte.

4.1.3 Sterilizácia (voliteľné)

Predmety možno sterilizovať autoklávom v režime 134 °C/2 bar, nezabalené, sterilizačný čas 3 minúty 30 sekúnd.

Predmety možno dezinfikovať 50 krát a sterilizovať 8 krát.

5 Výrobné číslo () a dátum expirácie ()

1. Nepoužívajte po dátume expirácie. Na označenie sa používa ISO štandard: „RRRR/MM“.
2. V prípade korešpondencie je potrebné uviesť nasledujúce čísla:
 - Číslo doobjednávky
 - Výrobné číslo
 - Dátum expirácie